

**WINGBRUSH<sup>®</sup>**  
technology by livinguard

PATENTIERTE UND REVOLUTIONÄRE  
**VIRUS-INKTIVIERUNGS-  
TECHNOLOGIE**

# SCHUTZMASKE PRO

ENGINEERED AND DESIGNED IN SWITZERLAND



**ELIMINIERT > 99,99% DES  
HUMANEN CORONAVIRUS  
229E\***



**WASCHBAR &  
WIEDERVER-  
WENDBAR**



**30x**  
WASCHBAR\*\*

ENTSPRICHT 210  
HERKÖMMLICHEN  
MASKEN



ENTSPRICHT 210  
HERKÖMMLICHEN  
MASKEN

ERHÄLTlich MIT UND OHNE VENTIL

# SIEBEN MONATE NUTZBAR

**WINGBRUSH®**  
technology by livinguard

## EINE MASKE, DIE >99,99% DES HUMANEN CORONAVIRUS 229E WIRKSAM ELIMINIERT

Der patentierte Livinguard-Stoff, der den Filter auf beiden Seiten bedeckt, inaktiviert/eliminiert Viren & Bakterien (> 99,99%)\*\*\* bei Kontakt kontinuierlich und verhindert aktiv die Übertragung von Mikroorganismen aus dem Maskenmaterial auf den Menschen.\*\*\*\*

\*Der Test wurde an der University of Arizona nach dem ISO 18184-Protokoll durchgeführt - dem internationalen Standard zur Bestimmung der antiviralen Wirksamkeit von Textilprodukten.

\*\*Bei täglicher Anwendung und einmal wöchentlichem Waschen.

\*\*\*Viren werden inaktiviert: „bei Kontakt“ bezieht sich auf eine Zeit von weniger als 5 Minuten.

\*\*\*\*Die Maske garantiert nicht, dass der Träger nicht infiziert wird.

Das Gewebe, das die Filtermedien bedeckt, wurde mit einer geschützten Technologie behandelt, die ein biozides Produkt mit PHMB enthält.

Die Maske kann nur wiederverwendet werden, wenn sie vorschriftsmäßig gehandhabt wird.


Verschmutzte Masken oder Masken, die irgendwelche Mängel aufweisen, sollten sofort entsorgt werden.

Designed and engineered in  
Switzerland

[www.wingbrush.com](http://www.wingbrush.com)



Je nach Gebrauch und Staubverhältnissen kann sie täglich oder sogar erst nach 7 Tagen gewaschen werden. Nur in kaltem Wasser waschen (unter 40 Grad).

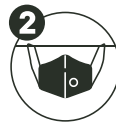

Im Schatten trocknen lassen. Wiederverwendbar bis zu 30 Waschgänge.



Die Maske nicht auswringen oder ziehen.



Keine Bleich- oder Waschmittel verwenden.



Nicht in der Waschmaschine oder im Trockner waschen. Nicht chemisch reinigen.



**1 = SCHUTZMASKE PRO**

